



◀ MANUAL DEL OPERADOR

Escanee o haga clic en este código para ver y descargar el Manual del operador de Infinity.

VIDEOS DE CAPACITACIÓN ▶

Escanee o haga clic en este código para ver videos de capacitación sobre la bomba de Infinity.



Alarma NO FOOD (sin alimento): La bomba ha detectado aire en el tubo.

¿La bolsa del equipo de infusión está vacía?

SÍ ▶

Vuelva a llenar la bolsa, vuelva a cebar el equipo de infusión y reanude la alimentación. Recuerde desconectar el equipo de la sonda de alimentación del paciente antes de volver a cebar.

▼ NO ▼

¿Hay aire en la sonda?

SÍ ▶

Si lo usa con una mochila, elimine el aire de la bolsa y el tubo: Cebe manualmente el tubo volteando la bolsa y apretando suavemente la mitad inferior de la bolsa mientras pellizca el tubo de color verde azulado justo debajo del símbolo de la gota "O". Mantenga esta posición hasta eliminar todo el aire de la bolsa y el tubo.

SÍ ▶

Si no lo usa con una mochila, elimine el aire del tubo: Cebe el tubo hasta eliminar todo el aire del tubo. Consulte el Manual del operador para obtener información adicional sobre las opciones de cebado.

▼ NO ▼

¿La fórmula está mezclada agresivamente?

SÍ ▶

Deje reposar la fórmula durante 10 a 15 minutos antes de verterla en la bolsa. Esto reducirá la posibilidad de que se active la alarma por presencia de aire en el tubo.

Alarma LOAD SET (cargar equipo): El botón de ejecución se presionó sin haber cargado correctamente el equipo.

¿La puerta está cerrada con el equipo correctamente cargado?

NO/NO SÉ ▶

Apague la bomba. Descargue y vuelva a cargar el cartucho. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada y vuelva a encender la bomba.

▼ SÍ ▼

¿Está limpio el receptáculo del cartucho, en especial alrededor de los sensores?

NO ▶

Descargue el cartucho del equipo de infusión y verifique que el receptáculo del cartucho esté limpio, en especial alrededor de los sensores de presión. Si es necesario limpiarlo, consulte el capítulo de Limpieza del Manual del operador para obtener instrucciones detalladas. Vuelva a cargar el cartucho.

▼ SÍ ▼

¿Está resquebrajada la puerta o rota la lengüeta del costado de la puerta?

SÍ ▶

NO ▶

Si la alarma continúa, comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para obtener asistencia.

Alarmas de error ER01 - ER99: La bomba no pasó la autoevaluación

¿Apagar y volver a encender la bomba resolvió la alarma?

SÍ ▶

Verifique todas las configuraciones y contadores de volumen antes de iniciar la alimentación.

NO ▶

Si la alarma continúa, comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para obtener asistencia.



Si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda para solucionar problemas, hable en directo con un representante de Moog Clinical, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Asistencia clínica y al cliente 800.970.2337
Visite moogmedical.com, donde encontrará más información.

MOOG[®]
Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Alarma NO FLOW IN (sin flujo de entrada): La bomba ha detectado una obstrucción en el equipo entre el equipo de infusión y la bomba.		
Alarma NO FLOW OUT (sin flujo de salida): La bomba ha detectado una obstrucción en el equipo entre la bomba y el paciente.		
¿La sonda del conjunto de administración está pinzada, acodada u obstruida?	sí ▶	Asegúrese de que el tubo del equipo de infusión no esté comprimido ni doblado, y reanude la alimentación.
▼ NO ▼		
Asegúrese de que el tubo del equipo de infusión no esté comprimido ni doblado, y reanude la alimentación.	SÍ/NO SÉ ▶	Desconecte el aparato de alimentación del paciente. Presione la tecla RUN (EJECUTAR). Si la bomba libera alimento sin emitir ninguna alarma, controle el tubo de alimentación del paciente para ver si está obstruido. Si la alarma continúa, quite el aparato de la bomba, frote suavemente el símbolo de gota "💧" y <u>manualmente</u> cebe el aparato hasta que la oclusión se haya resuelto y la fórmula avance a través de la tubería. Vuelva a colocar el aparato y continúe con la alimentación. Si la fórmula no avanza a través de la tubería o la alarma continúa, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Moog al 800 970 2337 para devolver la bomba y obtener ayuda. <i>Nota: No utilice la tecla PRIME (cebar) para solucionar problemas o resolver las alarmas NO FLOW IN (sin flujo de entrada) o NO FLOW OUT (sin flujo de salida).</i>
▼ NO ▼		
¿Está limpia la zona del sensor de presión del receptáculo del cartucho?	NO ▶	Descargue el cartucho del equipo de infusión y verifique que el receptáculo del cartucho esté limpio, en especial alrededor de los sensores de presión. Si es necesario limpiarlo, consulte el capítulo de Limpieza del Manual del operador para obtener instrucciones detalladas. Vuelva a cargar el cartucho.
▼ SÍ ▼		
¿Hay signos visibles de daño en la zona del sensor de presión?	sí ▶	Comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para devolver la bomba para que la reparen.
	NO ▶	
Problemas de carga		
¿El adaptador de CA/cargador está enchufado a un tomacorriente y a la bomba correctamente?	NO/NO SÉ ▶	Revise las conexiones del enchufe al tomacorriente y del adaptador a la bomba. La luz indicadora verde del enchufe del cargador debe estar encendida y en la pantalla de la bomba se debe ver el símbolo de un enchufe con barras de desplazamiento entre la E y la F del medidor de carga. Cuando la bomba esté totalmente cargada, las barras dejarán de desplazarse.
▼ SÍ ▼		
¿El tomacorriente funciona correctamente?	NO/NO SÉ ▶	Enchufe otro aparato en el tomacorriente para verificar que el tomacorriente funcione correctamente.
▼ SÍ ▼		
¿El adaptador/cargador parece estar dañado?	sí ▶	Comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para solicitar un nuevo cargador.
▼ NO ▼		
¿El puerto del cargador parece estar dañado, le faltan clavijas o están torcidas?	sí ▶	Comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para devolver la bomba para que la reparen.
▼ NO ▼		
¿El símbolo de la batería y la E y la F del medidor de carga parpadean?	sí ▶	Comuníquese con el servicio al cliente de Moog llamando al 800.970.2337 para devolver la bomba para que la reparen.
	NO ▶	